

TEM ALGUMA PERGUNTA? LIGUE PARA (800) 232-1700

SIDEKICK

COMO COMEÇAR A UTILIZAR
O SEU ALERTA MÉDICO MÓVEL



Carregamento do dispositivo

Para melhores resultados, carregue o seu Sidekick todas as noites.



Assim que receber o seu Sidekick, ligue a base de carregamento a uma tomada elétrica. Coloque o Sidekick na base com o botão de Ajuda SOS virado para a frente. Certifique-se de que o seu Sidekick está firmemente encaixado na base de carregamento para iniciar o carregamento. Quando o carregamento estiver a decorrer corretamente, a luz **VERMELHA** da base de carregamento acende-se e o Sidekick apresenta a mensagem "Charging" (a carregar).

Quando o Sidekick estiver totalmente carregado, a luz **VERMELHA** da base de carregamento desliga-se.



Certifique-se de que o fio na parte de trás da base de carregamento está firmemente encaixado.



TEM ALGUMA PERGUNTA?

LIGUE PARA (800) 232-1700



AJUDA
BOTÃO

MICROFONE



O **Sidekick** pode ser utilizado no duche mas não deve ser submerso em água.



BOTÃO DE TESTE

BOTÃO SILÊNCIO



Prima o **Botão Silêncio** duas vezes para desativar/ativar os alertas de voz.



LUZ DE ESTADO

A luz pisca a **VERDE** quando o Sidekick está a funcionar corretamente.

LUZ DE LOCALIZAÇÃO

A luz pisca a **AZUL** quando os serviços de localização estão disponíveis.

LUZ DE ALIMENTAÇÃO

O seu Sidekick precisa de ser carregado quando a luz de alimentação pisca a **VERMELHO**.



BOTÃO DE TESTE

Para testar o seu Sidekick, prima e mantenha premido o botão de Teste na parte lateral do seu Sidekick. Será feita a ligação ao nosso centro de testes.



NOTA

Para melhores resultados, teste o seu **Sidekick** todos os meses.

Em caso de emergência

Se precisar de ajuda, prima e mantenha premido o botão de Ajuda até sentir uma vibração ou ouvir os sons de ativação.



IMPORTANTE

Para cancelar uma ativação acidental, prima e solte o botão de Ajuda quando for acionado.



Deteção de quedas (opcional)

Nos dispositivos com a Deteção de quedas ativada, se não conseguir premir o botão de Ajuda e for detetada uma queda, o dispositivo envia um alerta de emergência de quedas para um Especialista de Cuidados.

Para obter melhores resultados, utilize o seu botão de Ajuda

A Deteção de quedas não deteta 100% das quedas. Se conseguirem, os utilizadores devem carregar sempre no seu botão quando precisam de ajuda.

TEM ALGUMA PERGUNTA?

LIGUE PARA (800) 232-1700


Desligar/Ligar

O seu Sidekick deve estar sempre ligado.


Se precisar de **DESLIGAR** o seu Sidekick, prima e **MANTENHA PREMIDOS** os botões de Teste e de Ajuda em conjunto até sentir uma vibração.

Todas as luzes do dispositivo devem apagar-se no espaço de um minuto.

Para voltar a **LIGAR** o seu Sidekick, pode premir os botões de Teste e de Ajuda em conjunto ou então colocar o dispositivo na base de carregamento .

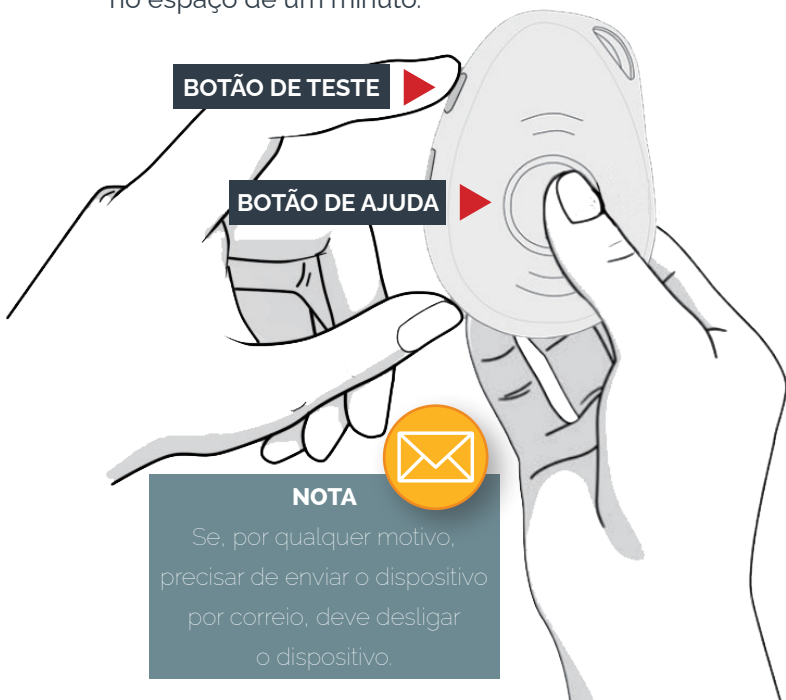

TEM ALGUMA PERGUNTA?

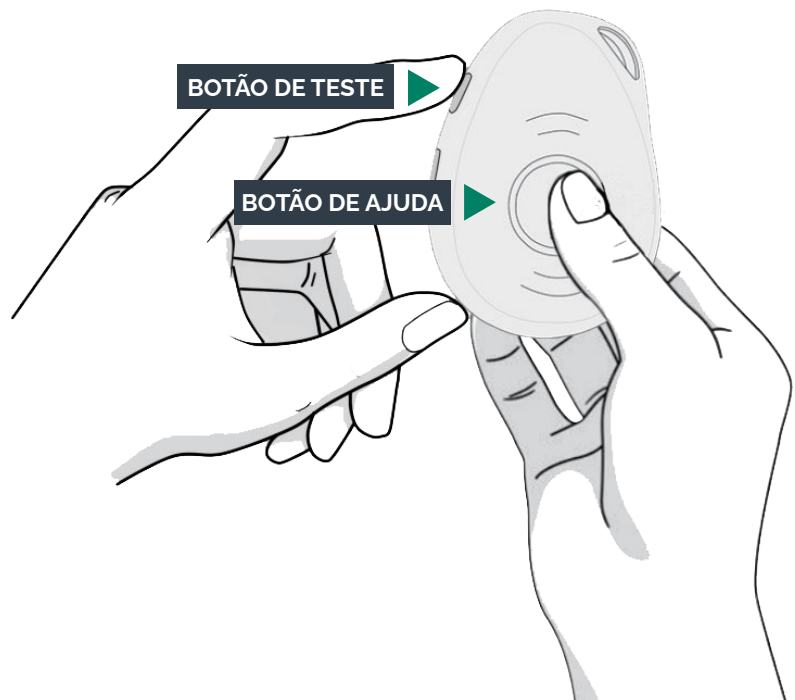

LIGUE PARA (800) 232-1700

**Estamos aqui para ajudar.
Ligue para (800) 232-1700
para obter ajuda.**

Este dispositivo está dependente da cobertura de rede móvel para funcionar.
Quando a cobertura de rede móvel for limitada,
poderá deparar-se com capacidades reduzidas do dispositivo.