

પ્રશ્નો? કૉલ કરો (800) 998-2400


# સાઇડક્રિ સ્માર્ટ

તમારી તબીબી ચેતવણી સ્માર્ટવોચ સાથે પૂરાંરંભ કરો



# ઝડપી પ્રારંભ માર્ગદર્શિકા

1. ચાર્જિંગ કેબલ દાખલ કરો બંધ પ્લગમાં.

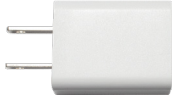

3. તેમાં પ્લગ કરો ઈલેક્ટ્રીકલ આઉટલેટ.



2. ચાર્જિંગ કેબલનો બીજો છેડો દાખલ કરો ક્લેડમાં.



4. સાઇડકલ્કિ સ્માર્ટને ચાર્જિંગ ક્લેડમાં મૂકો. તમે સાંભળશો કે "તમારી વોચ ચાર્જ થઈ રહી છે".

5. જ્યાં સુધી તમને ન સંભળાય ત્યાં સુધી બાજુના બટનને દબાવીને અને પકડી રાખીને સાઇડકલ્કિ સ્માર્ટનું પરીક્ષણ કરો. "મદદ બટન સક્રિય". જ્યારે તમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તમને મદદની જરૂર છે, ત્યારે જણાવો કે તમે તમારા ઉપકરણનું પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો.

ચાર્જિંગ ક્લેડ પર ચાર્જિંગ પાન સાથે સાઇડકલ્કિ સ્માર્ટના નીચે ચાર્જિંગ સંપર્કોને સંરેખિત કરો.

જ્યારે ચાર્જિંગ ક્લેડ પર, સક્રિય બેટરી ટકાવારી પ્રદર્શિત કરશે.



પ્રશ્નો?

કોલ કરો (800) 998-2400

## તમારી સાઇડકલ્કિ સ્માર્ટને જાણો

જો સ્ક્રીન ખાલી હોય, તો સમય અને તારીખ દર્શાવવા માટે હોમ બટન દબાવો.



શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે દરરોજ રાત્રે તમારા સાઇડકલ્કિ સ્માર્ટને ચાર્જ કરો.

## કટોકટીના કસિસામાં

જો તમને મદદની જરૂર હોય, દબાવો અને પકડી રાખો હોમ બટન જ્યાં સુધી તમે "મદદ સાંભળો નહીં બટન સક્રિય થયેલ છે."



## બેટરી ચેતવણી

જ્યારે બેટરીનું સ્તર ઓછું હશે, ત્યારે તમને ઓછી બેટરીનો સંદેશ સાંભળવા મળશે અને બેટરી સ્તરનું સૂચક લાલ થઈ જશે. જ્યારે આવું થાય, ત્યારે તમારે તમારા ઉપકરણને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ચાર્જ કરવું જોઈએ.



શરૂઆત પરિણામો માટે  
દરરોજ રાત્રે તમારા સાઇડકલકિ  
સ્માર્ટને ચાર્જ કરો.

## તમારી એપ્લિકેશનો શોધી રહ્યા છીએ

સમય જોતી વખતે, તમારી એપ્સને એક્સેસ કરવા માટે ડાબે કે જમણે સ્વાઇપ કરો.



પ્રશ્નો?

કોલ કરો (800) 998-2400

# એપ્લિકેશન ખોલી રહ્યા છીએ

એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટે, તેને શોધવા માટે સ્વાઇપ કરો અને એપ્લિકેશન આઇકન પર દબાવો.

## હૃદયના ધબકારા

તમારા હૃદયના ધબકારાને માપો.



હૃદયના ધબકારાનું મોનિટર માત્ર માહિતીના હેતુઓ માટે છે અને તેનો હેતુ નદિન અથવા સારવારની પરંપરાગત પદ્ધતિઓને બદલવાનો નથી.

## પેડોમીટર

તમારા દૈનિક પગલાં અને પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખો.



## હવામાન

આજના હવામાનની આગાહી મેળવો.



## વૉચ બંધ કરો

તમારા સાઇડકલિક સ્માર્ટને બંધ કરો.



વૉચને ફરી ચાલુ કરવા માટે, હોમ બટનને દબાવીને પકડી રાખો.


અમે સલામતી હેતુઓ માટે ભલામણ કરીએ છીએ કે જ્યાં સુધી જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી તમારી વૉચ બંધ ન કરવી.

પ્રશ્નો?

કોલ કરો (800) 998-2400

## શાવર સેફ

સાઇડકકિ સ્માર્ટ પાણી પ્રતરિધક છે અને તેને હાથ ધોતી વખતે, છોડમાં પાણી આપતી વખતે અને સ્નાન કરતી વખતે પહેરી શકાય છે.

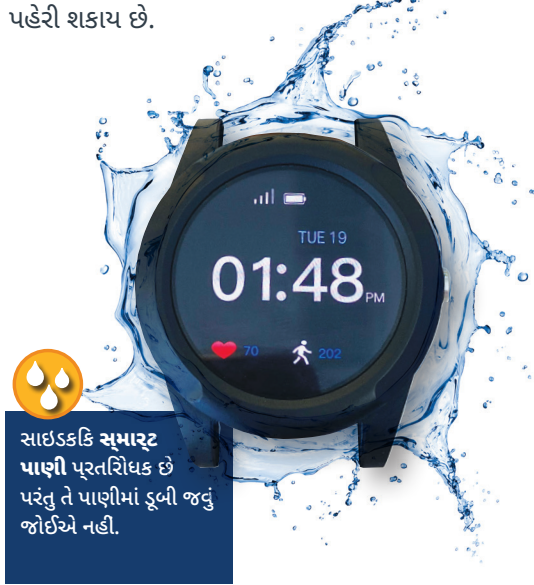

સાઇડકકિ સ્માર્ટ પાણી પ્રતરિધક છે પરંતુ તે પાણીમાં ડૂબી જઇ જોઈએ નહીં.

પ્રશ્નો?

## વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

### બેટરી જીવન

મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓ માટે વૉચની બેટરી 3 દવિસ સુધી ટકી રહેવી જોઈએ. તેને સંપૂર્ણ રીતે ચાર્જ થવામાં સરેરાશ 3 કલાક જેટલો સમય લાગશે.

### સેલ્યુલર કવરેજ

સાઇડકકિ સ્માર્ટ તેના પોતાના પર સેલ્યુલર નેટવર્ક સાથે જોડાય છે અને તેને ફોન સાથે જોડવાની જરૂર નથી.

જ્યાં નેટવર્ક કવરેજ અસ્તિત્વમાં છે ત્યાં સાઇડકકિ સ્માર્ટ યુએસ ના તમામ 50 રાજ્યો, પ્યુઅર્ટો રિકો અને મોટાભાગના યુએસ પ્રદેશોમાં કામ કરશે.

### ઉન્નત સ્થાન સેવાઓ

કટોકટીની સ્થિતિમાં, સાઇડકકિ સ્માર્ટ અદ્યતન સ્થાન ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં, અમારા સંભાળ નષિણાતોને તમે ક્યાં છો તે નરિધારતિ કરવામાં મદદ કરે છે.

કોલ કરો (800) 998-2400

અમે અહીં મદદ કરવા માટે આવ્યા છીએ.  
કૉલ કરો (800) 998-2400  
સહાય માટે.

આ ઉપકરણ કામ કરવા માટે સેલ્યુલર કવરેજ પર નરિભર છે.  
જ્યાં સેલ્યુલર કવરેજ મર્યાદિત છે, ત્યાં તમને ઉપકરણની ઘટતી  
ક્ષમતાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.