

क्या आपके कोई सवाल हैं? (800) 998-2400 पर कॉल करें


साइडकिकिस्मार्ट

आपके मेडिकल अलर्ट स्मार्टवॉच
के साथ शुरूआत करना



क्वकि स्टार्ट गाइड

1. चार्जिंग केबल को साथ में मौजूद प्लग में डालें।

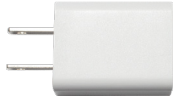

3. इसे एक बजिली के सॉकेट में लगाएं।



2. चार्जिंग केबल के दूसरे सरि को करैडल में डालें।



4. साइडककि स्मार्ट को चार्जिंग करैडल में रखें। आपको सुनाई देगा **“थोर वॉच इज़ चार्जिंग”**।

5. साइड बटन को दबाकर रखते हुए साइडककि स्मार्ट की तब तक जाँच करें जब तक आपको **“हेल्प बटन एक्टिविटीड”** सुनाई न दे। जब आपसे पूछा जाए किकिया आपको मदद की ज़रूरत है, तो बताएँ किकि आप अपने डविाइस की जाँच कर रहे हैं।

साइडककि स्मार्ट के नचिले भाग पर चार्जिंग कॉन्टेक्ट्स को चार्जिंग करैडल पर चार्जिंग पत्तियों के साथ अलाइन करें।



चार्जिंग करैडल पर रहने के दौरान, स्क्रीन पर बैटरी प्रतशित दखिाई देगा।

क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 998-2400 पर कॉल करें

अपने साइडकिकि स्मार्ट को जाने

यदि स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो समय और दिनांक दिखाने के लिए होम बटन दबाएँ।



बेहतरीन परणामों के लिए,
अपने साइडकिकि स्मार्ट को
हर रात चार्ज करें।

आपात्कालीन स्थिति में

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो होम बटन को दबाएँ और तब तक **दबाकर रखें** जब तक आपको **"हेल्प बटन एक्टिविटी"** सुनाई न दे।



बैटरी चार्जिंग

जब बैटरी लेवल कम होगा, तो आपको बैटरी कम होने का मैसेज सुनाई देगा और बैटरी लेवल इंडिकेटर लाल हो जाएगा। जब ऐसा हो तो आपको अपने डेवाइस को जितना जल्दी हो सके चार्ज कर लेना चाहिए।



बेहतरीन परिणामों के लिए, अपने साइडकिक स्मार्ट को हर रात चार्ज करें।



अपने ऐप्स को ढूँढना

समय देखते समय, अपने ऐप्स तक पहुंचने के लिए बाएं या दाएं स्वाइप करें।



क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 998-2400 पर कॉल करें

एक ऐप को खोलना

किसी ऐप का उपयोग करने के लिए उसे ढूंढने के लिए स्वाइप करें और ऐप आइकन पर दबाएं।

हार्ट रेट

अपना हार्ट रेट नापें।



हार्ट रेट मॉनीटर केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य नदिन या उपचार के पारंपरिक तरीकों की जगह पर उपयोग करना नहीं है।

पेडोमीटर

अपने डेली स्टेप्स और एक्टिविटी को ट्रैक रखें।



मौसम

आज के मौसम का पूर्वानुमान पाएं।



घड़ी को बंद करें

साइडकिकि स्मार्ट को बंद करें।



घड़ी को फिर से चालू करने के लिए, होम बटन को दबाकर रखें।

हम सुरक्षा कारणों से यह सलाह देते हैं कि जब तक आवश्यक न हो, अपनी घड़ी को बंद न करें।

क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 998-2400 पर कॉल करें

शाँवर में सुरक्षति है

साइडककि स्मार्ट जल प्रतरिधी है और इसे हाथ धोते समय, पौधों को पानी देते समय और नहाते समय पहना जा सकता है।



साइडककि स्मार्ट
जल प्रतरिधी है
लेकनि इसे पानी में नहीं
डुबोना चाहएि।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैटरी लाइफ

घड़ी की बैटरी ज़्यादा समय तक चलती है, ज़्यादातर उपयोगकर्ताओं के लिए, 3 दिन तक। इसे पूरी तरह चार्ज होने में औसतन 3 घंटे तक का समय लग सकता है।

सेलुलर कवरेज

साइडककि स्मार्ट स्वयं ही सेलुलर नेटवर्क से जुड़ जाता है और इसे किसी फोन के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं होती।

जहां नेटवर्क कवरेज मौजूद होता है, वहाँ साइडककि स्मार्ट सभी 50 अमेरिकी राज्यों, प्यूरटो रिको और अधिकांश अमेरिकी क्षेत्रों में काम करेगा।

एनहांसड लोकेशन सर्विस

आपातकालीन स्थिति में, साइडककि स्मार्ट, जहां उपलब्ध हो, एडवांसड लोकेशन डेटा का उपयोग करता है, ताकि हमारे देखभाल वशिषज्जों को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि आप कहां हैं।

क्या आपके कोई सवाल हैं?

(800) 998-2400 पर कॉल करें

**हम सहायता के लिए यहां उपलब्ध हैं।
(800) 998-2400 पर कॉल करें
सहायता के लिए।**

यह डवाइस काम करने के लिए सेलुलर कवरेज पर निर्भर है। जहां सेलुलर कवरेज सीमित है, आपको डवाइस की क्षमता में कमी आ सकती है।