

HAI DOMANDE? CHIAMA IL NUMERO (800) 998-2400

SIDEKICK **SMART**

GUIDA INTRODUTTIVA AL TUO DISPOSITIVO DI
ALLERTA MEDICA MOBILE



Guida Rapida

1. Inserisci il cavo di ricarica nella presa inclusa nella confezione.



2. Inserisci l'altra estremità del cavo di ricarica nella base di ricarica.



3. Collegalo a una presa elettrica.



4. Posiziona il Sidekick Smart nella base di ricarica. Sentirai **"il tuo orologio è in carica"**.

Allinea i contatti di ricarica nella parte inferiore del Sidekick Smart con i pin di ricarica sulla base di ricarica.

5. Prova il SideKick Smart tenendo premuto il pulsante laterale fino a sentire **"Pulsante di emergenza attivato"**. Quando ti viene chiesto se hai bisogno di aiuto, rispondi che stai testando il tuo dispositivo.



Quando si trova sulla base di ricarica, lo schermo mostrerà la percentuale della batteria.

Scopri il tuo Sidekick Smart

Se lo schermo non mostra niente, premi il tasto Home per visualizzare l'ora e la data.



Per ottenere risultati ottimali, carica il tuo **Sidekick Smart** ogni notte.

In caso di emergenza

Se hai bisogno di assistenza, **TIENI PREMUTO** il pulsante Home finché non senti "**Pulsante di emergenza attivato**"



HAI DOMANDE ?

CHIAMA IL NUMERO (800) 998-2400

Avviso batteria

Quando il livello della batteria diventa basso, sentirai un messaggio di batteria scarica e l'indicatore del livello della batteria diventerà rosso. In questo caso, dovrai caricare il tuo dispositivo il prima possibile.



Livello della batteria

Per ottenere risultati ottimali, carica il tuo **Sidekick Smart** ogni notte.

Come trovare le tue app

Quando visualizzi l'ora, scorri verso sinistra o verso destra per accedere alle tue app.



Home Pulsante

HAI DOMANDE ?

CHIAMA IL NUMERO (800) 998-2400

Come aprire un'app

Per utilizzare un'app, scorri per trovarla e premi sull'icona dell'app.

Frequenza cardiaca

Misura la tua frequenza cardiaca.



Il cardiofrequenzimetro va usato solo a scopo informativo e non è destinato a sostituire i metodi tradizionali di diagnosi o trattamento.

Pedometro

Tieni traccia dei tuoi passi e delle tue attività quotidiane.



Meteo

Ottieni oggi le previsioni del tempo.



Spegni l'orologio

Spegni il tuo Sidekick Smart.



Per riaccendere l'orologio, tieni premuto il Pulsante Home.

Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di non spegnere l'orologio, se non in caso di necessità.

HAI DOMANDE ?

998-2400

CHIAMA IL NUMERO (800)

Doccia sicura

Sidekick Smart è resistente all'acqua e può essere indossato mentre ci si lava le mani, si innaffiano le piante e si fa la doccia.



IL Sidesick Smart è resistente all'acqua, ma non deve essere immerso.

HAI DOMANDE ?

FAQ

Durata della batteria

La batteria dell'orologio dovrebbe avere un'autonomia fino a 3 giorni per la maggior parte degli utenti. In media, la ricarica completa richiede fino a 3 ore.

Copertura cellulare

Il SideKick Smart si connette autonomamente alla rete cellulare e non necessita di essere associato a un telefono.

Dove è presente copertura di rete, il SideKick Smart opererà in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, Porto Rico e nella maggior parte dei territori statunitensi.

Servizi di localizzazione avanzati

In caso di emergenza, Sidekick Smart utilizza dati di localizzazione avanzati, ove disponibili, per aiutare i nostri specialisti dell'assistenza a individuare con precisione dove ti trovi.

CHIAMA IL NUMERO (800) 998-2400

**Siamo qui per aiutarti.
Chiama il numero (800) 998-2400
per ricevere assistenza.**

Questo dispositivo richiede una copertura cellulare per funzionare correttamente. In caso di copertura cellulare limitata, le funzionalità del dispositivo potrebbero risultare ridotte.