

有問題嗎？ 致電 (800) 998-2400

SIDEKICK^{SMART}

開始使用 您的醫療警報智慧手錶



快速入門指南

1. 插入充電線至插入隨附的插頭。



3. 將其插入電源插座。電源插座。



2. 將充電線的另一端插入充電座。



4. 將 Sidekick Smart 放入充電座。你會聽到「您的手錶正在充電」。

將 Sidekick Smart 底部的充電接點與充電座上的充電插腳對齊。

5. 透過按測試 SideKick Smart 並按住側邊按鈕直到你聽到「幫助按鈕已啟動」。當被問及是否需要協助時，請說明您正在測試您的設備。



在在充電底座上時，螢幕將顯示電池百分比。

了解你的 Sidekick Smart

如果螢幕空白，請按下主畫面按鈕，以顯示時間與日期。



為了獲得最佳效果，請每晚為您的 Sidekick Smart 充電。

緊急情況下

如果您需要協助，請按下並**保持**主頁按鈕，直到您聽到已啟用**幫助按鈕**為止。



有問題嗎？

致電 (800) 998-2400

電池警告

當電池電量低時，您將聽到電池電量低的消息，並且電池電量指示燈將變為紅色。發生這種情況時，您應該盡快為設備充電。



電池電量

為了獲得最佳效果，
請每晚為您的 Sidekick
Smart 充電。

尋找您的應用程式

檢視時間時，向左或向右滑動以進入您的應用程式。



主頁
按鈕

有問題嗎？

致電 (800) 998-2400

開啟應用程式

要使用應用程式，請滑動以找到它，
然後按下應用程式圖示。

心率

測量你的
心率。



心率監測器僅供參考，並
非用來取代傳統的診斷或治
療方法。

計步器

追蹤您的每日步數和
活動。



天氣

獲取今天的
天氣預報。



關閉手錶

關閉Sidekick Smart。



若要重新開啟手錶，
請按住主畫面按鈕。

出於安全目的，我們建議除非
必要，否則不要關閉手錶。

有問題嗎？

致電 (800) 998-2400

淋浴安全

Sidekick Smart 具備防水功能，可在洗手、澆花和淋浴時佩戴。



有問題嗎？

常問問題

電池壽命

對大多數使用者而言，手錶電池的續航力應可達到最多 3 天。充滿電平均需要 3 小時。

蜂窩網路覆蓋

SideKick Smart 自行連接到行動網路，無需與手機配對。

在有網路覆蓋的地區，SideKick Smart 可在美國 50 個州、波多黎各及大部分美屬領地使用。

增強的定位服務

在緊急情況發生時，Sidekick Smart 會使用先進的位置資料(如果有)來幫助我們的護理專家確定所在的位置。

致電 (800) 998-2400

**我們隨時為您提供協助。
致電 (800) 998-2400
尋求幫助。**

此裝置需依賴行動網路覆蓋才能運作。在行動網路覆蓋有限的地方，您可能會遇到設備功能減少的情況。